

# ALGISITE<sup>◇</sup> M

Pansament cu alginat de calciu

**SterillR** De unica folosinta. Sterilizat la radiatii gama. A nu se folosi daca ambalajul este deschis sau deteriorat. A se depozita in loc uscat (<25°C).

## Descriere

Pansamentul ALGISITE M cu alginat de calciu este alcatuit din fibre de alginat ce formeaza un material netesut gros si foarte absorbant. Procesul de prelucrare reduce pierderea de fibre si ii mareste rezistenta.

## Mod de actiune

Cand ALGISITE M absoarbe exsudatul, ionii de sodiu din exsudat inlocuiesc ionii de calciu in alginat. Acest lucru permite fibrelor care absorb exsudatul sa se transforme in gel.

## Indicatii

Pentru tratamentul escarelor si a ulcerului venos, cu cantitati moderate si ridicate de exudat. Pentru facilitarea controlului sangerarilor minore.

## Contraindicatii

A nu se folosi la pacientii cu alergii la pansamente cu alginat.

## Instructiuni de folosire

1. Curatati plaga urmand protocoalele clinice existente.
2. Pansamentele ALGISITE M trebuie aplicate folosind o tehnica adecvata. Alegeti un pansament putin mai mare decat plaga si aplicati-l cu grija pe platul plagii, acoperind intreaga suprafata. Pansamentul nu trebuie sa depaseasca marginile plagii, astfel incat partile in exces trebuie taiate sau pliate peste zona plagii. Daca plaga este adanca sau cu buzunare, benzile de alginat pot fi cea mai buna alegere.
3. Acoperiti cu un pansament adecvat. Alginatul absoarbe exsudatul si formeaza un gel hidrofilic pe suprafata plagii. Exsudatul se evaporata din gel iar pansamentul secundar nu trebuie sa blocheze acest proces .

## Frecventa schimbarii pansamentului

Frecventa schimbarii pansamentului depinde de tipul si conditia plagii. In mod normal, in cazul plagilor cu nivel ridicat de exsudat sau a plagilor infectate, pansamentele trebuie schimbate zilnic, trecand la doua schimbari pe saptamana pe masura ce procesul de vindecare avanseaza.

Schimbatii pansamentul daca exsudatul trece prin acesta sau daca pansamentul secundar este imbibat. In cazul folosirii pe plagi infectate, infectia trebuie evaluata si tratata conform protocoalelor clinice existente.

## Indepartarea pansamentului

Folositi pense sau manusi pentru indepartarea cu grija a pansamentului ALGISITE M, ridicandu-l de pe suprafata plagii. In general, umezirea pansamentului permite indepartarea acestuia intr-o singura bucata. Daca nivelul exsudatului este unul foarte scazut, pansamentul poate adera la plaga. Daca pansamentul este dificil de indepartat, umeziti-l in prealabil cu solutie salina.

## Precautii

Verificati ca pansamentele introduse in cavitati, sinusuri etc. sa fi fost indepartate. ALGISITE M poate fi folosit in tratamentul plagilor predispuse la sangerare minora dar nu este conceput pentru a inlocui buretele chirurgical hemostatic sau pentru a realiza hemostaza in plagi cu sangerare mare. Au existat cazuri foarte rare de asociere a hipercalcemiei cu folosirea pansamentelor cu alginat pe suprafete foarte mari.

## Disponibilitatea produsului

Cod	Dimensiuni	Ambalare
66000519	5cm x 5cm	Pachet de 10
66000520	10cm x 10cm	Pachet de 10
66000521	15cm x 20cm	Pachet de 10
66000522	2cm x 30cm	Pachet de 5
66000718	10cm x 10cm	Pachet de 3
66000719	15cm x 15cm	Pachet de 3

## Producator

Produs in Marea Britanie de catre  
Smith & Nephew Medical Limited, Hull HU3 2BN England.  
Trade Marks of Smith & Nephew ©Smith & Nephew 2008  
www.smith-nephew.com

## Importator

Medical Ortovit srl \* str. Miron Costin nr. 8, 011098 Bucuresti, sector 1  
Telefon: (+40) 21 222.80.67 /68 /69 \* 0724240285 \* 0731493261  
Fax: (+40) 21 222.80.72 \* E-mail: office@ortovit.eu \* Web: www.ortovit.eu  
Magazin online www.ortovit.eu/magazin